

Baehr fotel podologiczny Omega

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za wybór fotela podologicznego Omega. Zakupione urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby spełnić Twoje bieżące potrzeby. Jego uniwersalność i możliwości adaptacji sprawiają, że dostosuje się także do Twoich potrzeb w przyszłości.

Zanim rozpoczniesz użytkowanie urządzenia uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją bezpiecznym miejscu.

W ten sposób w pełni zrozumiesz funkcjonowanie urządzenia, będziesz mógł najlepiej wykorzystać jego potencjał i zachowasz jego najwyższy poziom sprawności, bezpieczeństwa i niezawodności przez cały czas użytkowania.

Niezależnie od okoliczności możesz zawsze liczyć na profesjonalne podejście naszych dystrybutorów, fachową wiedzę naszego działu technicznego oraz solidność naszych konstruktorów.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje mające na celu zapewnienie bezpiecznej obsługi fotela zabiegowego. Przechowuj ją zawsze w pobliżu urządzenia, łatwo dostępną dla każdego użytkownika.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i użytkowaniem fotela zabiegowego uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i upewnij się, że wszystkie zawarte w niej wskazówki i zalecenia są w pełni zrozumiałe. Instrukcja zawiera ważne zalecenia bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji.

Jeżeli fotel jest użytkowany do jakiegokolwiek innego celu niż został zaprojektowany, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi, takie użytkowanie będzie naruszało warunki gwarancji producenta.

Jednostka kontrolna może być otwierana wyłącznie przez producenta lub specjalistę zatwierzonego i upoważnionego przez producenta.

Po rozpakowaniu sprawdź zawartość dostawy, aby upewnić się, że urządzenie jest kompletne, a podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Nigdy nie używaj fotela z uszkodzonym kablem zasilania. Nie blokuj, ani nie skręcaj kabla i nie układaj go na żadnej gorącej powierzchni (np. grzejnik, lampa, itp.).

Jeżeli kabel zasilający ulegnie jakiegokolwiek uszkodzeniu, niezwłocznie odłącz fotel od źródła zasilania. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta przed jego ponownym użyciem.

Przed podłączeniem kabla do zasilania upewnij się, że napięcie (V) opisane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu źródła zasilania.

Nigdy nie odłączaj kabla zasilania z gniazdka mokrymi dłońmi. Nigdy nie próbuj wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za kabel.

Nie użytkować w wilgotnym otoczeniu. Nie zachlapywać płynem.

W przypadku, gdy płyn lub inne ciało obce dostanie się do wnętrza jednostki kontrolnej, niezwłocznie odłącz fotel od zasilania. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta przed jego ponownym użyciem.

Zawsze przed czyszczeniem odłączaj fotel od zasilania, wyciągając wtyczkę.

DZIAŁANIE

1. Oparcie
2. Podłokietnik
3. Siedzisko
4. Podpórki pod nogi
5. Pedał kontrolny
6. Przełącznik ON/ OFF



PEDAŁ KONTROLNY

PO

Resetowanie

m1

Wybór pozycji (górze)

m2

Wybór pozycji (dół)



Zapamiętany program pracy 1



Zapamiętany program pracy 2

S



Wybór ruchu (baza, siedzisko, oparcie)




Aby awaryjnie zatrzymać działanie urządzenia, naciśnij dowolny przycisk



Włączanie/ wyłączenie zasilania i resetowanie systemu

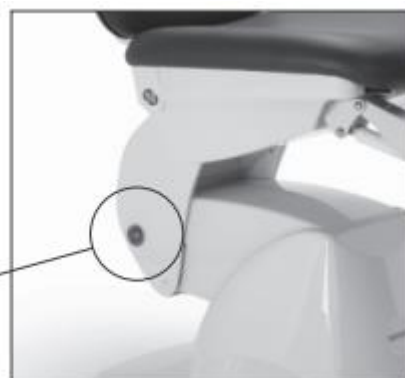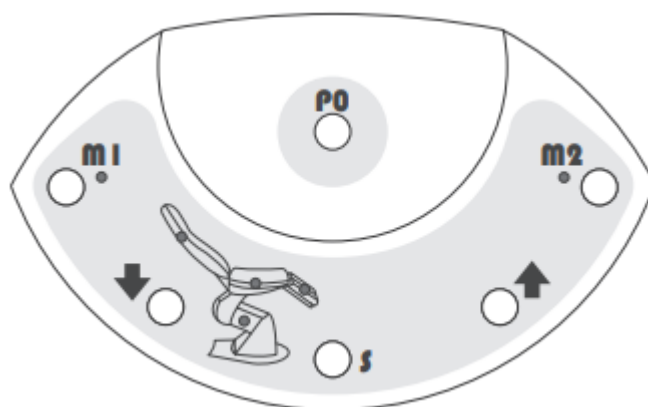

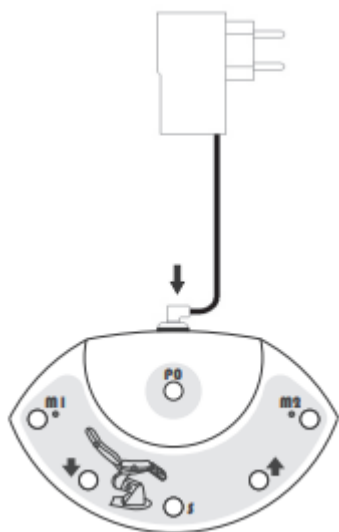

ŁADOWANIE AKUMULATORA BEZPRZEWODOWEGO PEDAŁU KONTROLNEGO (OPCJONALNE)

Podłącz pedał do ładowarki.

Minimalny czas ładowania 8h.

Zaleca się ładowanie pedału w weekendy.

URUCHAMIANIE

Naciśnij zielony przycisk po lewej stronie fotela, aby go uruchomić.

PORUSZANIE FOTELEM

Aby poruszyć fotelem, do pożądanego położenia, naciśnij **S**, aby wybrać silnik, a następnie wybierz pozycję przyciskami góra lub dół.

PAMIĘĆ I POWRÓT DO POZYCJI POCZĄTKOWEJ

Pozycja początkowa: Naciśnij przycisk resetowania **P0**.

Korzystanie z pamięci: Naciśnij przycisk **M1** lub **M2** przez dwie sekundy, aby ustawić fotel w zapamiętanej pozycji.

Aby awaryjnie zatrzymać działanie urządzenia, naciśnij dowolny przycisk

ZAPAMIĘTYWANIE POZYCJI PRACY

Po zresetowaniu, ustaw fotel w pożądanym położeniu.

Naciśnij i przytrzymaj **S**, a następnie **M1** lub **M2** przez 5 sekund.

Sygnal dźwiękowy potwierdzi zapamiętanie właściwej pozycji.

ZAKRES RUCHÓW

Omega obraca się w zakresie 360°


Odblokowywanie: Naciśnij na dźwignię i obróć w prawo.

Blokowanie: Obróć dźwignię w lewo.



INDYWIDUALNE PODPÓRKI NÓG

Podpórki nóg są zamontowane na teleskopowych prowadnicach umożliwiając rozchylenie na boki w zakresie od -35° do + 35°. Podpórki można przedstawiać także w pionie, w zakresie 90°, za pomocą specjalnych uchwytów umieszczonych po bokach.

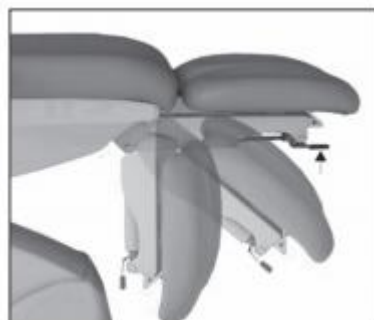

PODŁOKIETNIKI

Podłokietniki są niezależne od siebie. Podłokietniki zawsze pozostaną równoległe do siedziska, zmieniając jedynie odstęp w zależności od pochylecia oparcia pleców. Składają się, aby ułatwić pacjentowi siadanie na fotel i wstawanie z fotela. Pacjent ma dostęp do fotela zarówno z przodu, jak i z boku.



CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie!



Ryzyko porażenia prądem.

Odłącz główny kabel zasilający przed rozpoczęciem czyszczenia.

Uwaga!



Należy dbać, aby olej i inne produkty konserwacyjne nie miały kontaktu z tapicerką fotela, ponieważ mogą ją uszkodzić.

Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych fotela (części wykonane z tworzyw sztucznych, elementów lakierowanych oraz tapicerki) należy używać zwykłych, dostępnych na rynku środków dezynfekcyjnych. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zawarte w produkcie substancje aktywne nie przekraczają maksymalnych stężeń:

- Glutaraldehyd 2%: 10%
- Etanol 96%: 40%
- Formaldehyd: 0,01%
- Glyoxal: 0,15%
- Propanol: 35%



UWAGA! Nie przekraczać podanych wartości stężeń. Nie używać produktów zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje cierne. Zdezynfekowane powierzchnie przetrzeć wilgotną ściereczką (środki dezynfekujące, nawet rozcieńczone, mogą uszkadzać powierzchnie).

Środki dezynfekcyjne nanosić na powierzchnie miękką ściereczką: nie spryskiwać bezpośrednio powierzchni, pozwoli to uniknąć wnikanie roztworów do wnętrza urządzenia, co mogłoby zakłócić jego działanie.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji.

INSTRUKCJE OGÓLNE

Podstawę fotela należy utrzymywać w czystości, aby uniknąć gromadzenia się odpadów organicznych pod pokrywą, co mogłoby wywoływać nieprzyjemne zapachy.

Należy bezwzględnie unikać zalania podstawy fotela jakimikolwiek płynami. W przypadku nieumyślnego zmożenia, podstawę należy jak najszybciej wysuszyć.

Zgodność z wymaganiami dyrektywy EWG 93/42 (w sprawie Wyrobów Medycznych) zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika, pacjenta i środowiska.

OSTRZEŻENIA

Zastosowanie fotela:

Fotel jest przeznaczony dla fachowego personelu, jako pomoc w zabiegach podologicznych. Fotel został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o zabiegach dla pacjentów w każdym wieku.

Fotel nie może być użytkowany przy zabiegach z palnymi gazami anestetycznymi. Przy zabiegach u pacjentów z rozrusznikami serca lub podobnymi urządzeniami należy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń zawartych w literaturze fachowej.

Nie przekraczać maksymalnych obciążeń fotela, podanych w części „Specyfikacja Techniczna”. Nie usuwać żadnych naklejek znajdujących się na urządzeniu. W razie ich uszkodzenia wymienić na nowe.

Zasilanie:

Należy upewnić się, że obwód zasilania elektrycznego urządzenia jest zabezpieczony bezpiecznikiem różnicowym 16A o progu działania 10mA.

Należy upewnić się, że fotel ma oddzielny obwód zasilania.

Należy upewnić się, że sieć zasilająca fotel ma skuteczny system uziemienia, oraz że przewody są zgodne z obowiązującymi normami.

Otoczenie:

W ekstremalnych warunkach klimatycznych (upał, zimno, wilgotność) zaleca się po rozpakowaniu fotela, przed jego uruchomieniem, odczekać kilka godzin. Taki środek ostrożności zapewni czas potrzebny na odparowanie kondensatu, który mógł powstać wewnątrz opakowania.

Naprawy i konserwacja okresowa:

Fotel zabiegowy nie wymaga specjalnych czynności konserwacyjnych, jeżeli jest użytkowany właściwie i zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami producenta. Niemniej, w przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Wyłącznie osoby autoryzowane przez producenta mogą dokonać napraw urządzenia. Wszelkie zmiany lub naprawy przeprowadzone przez osoby nieautoryzowane skutkują nieważnością wszelkich gwarancji i odpowiedzialności producenta. Ponadto, takie zmiany lub naprawy mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia.

PENTA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie elektryczne: 230 V
- Napięcie robocze: 24 V
- Pobór prądu: 2.5 A
- Nośność: 220 kg
- Maksymalne obciążenie podpórek nóg: 35 kg każdy
- Maksymalne obciążenie podłokietników: 40 kg każdy
- Maksymalne obciążenie oparcia pleców: 60 kg
- Waga fotela: 97 kg
- Wymiary fotela: 710 mm x 795 mm x 1385 mm

IDENTYFIKACJA USTEREK I ROZWIĄZANIA

Usterka: Automatyczne ustawienie fotela nie działa

Przyczyna: Kabel zasilający nie jest poprawnie podłączony. Gniazdko jest uszkodzone.

Rozwiązanie: Sprawdź podłączenie głównego kabla zasilającego. Wtyczka musi być właściwie wetknięta. Sprawdź działanie gniazdka elektrycznego podłączając inne urządzenie (np. lampkę stołową).

W przypadku wszelkich innych problemów niewymienionych powyżej, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta

SYMBOLE



Prąd zmienny



Uziemienie



Napięcie (230V)



Uwaga: patrz instrukcję użytkowania przed użyciem



Deklaracja zgodności WE



Dział Obsługi Klienta (czynność wykonania wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny)


IDENTYFIKACJA

Fotel zabiegowy jest identyfikowany dzięki tabliczce znamionowej umieszczonej pod prawym podłokietnikiem. Na tabliczce naniesiono numer seryjny urządzenia.

W przypadku kontaktu z Centrum Obsługi Klienta lub zamawiania części zamiennych zawsze podawaj numer seryjny urządzenia.



WYMIARY I ZAKRES RUCHÓW

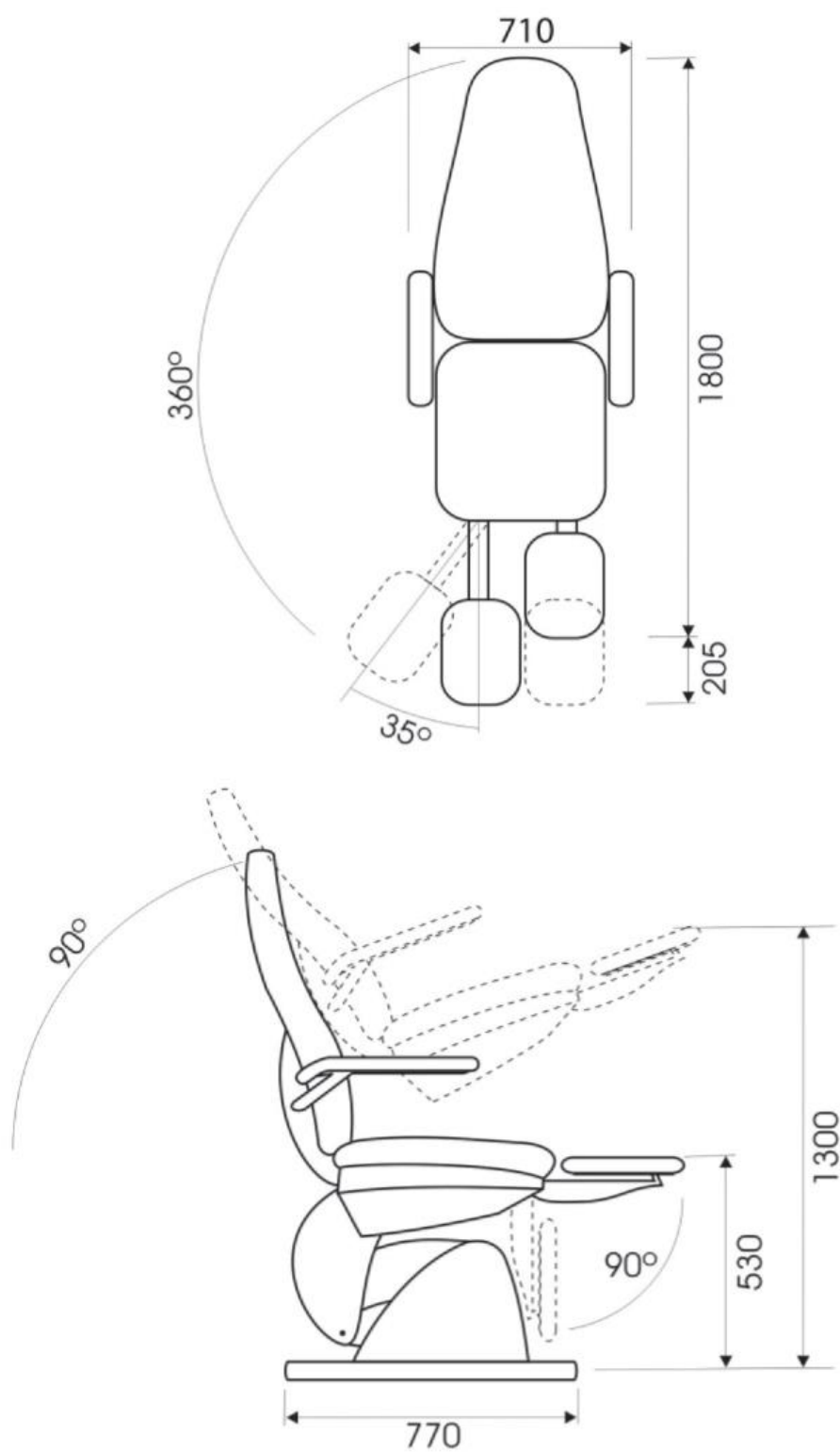

Import i dystrybucja:

Kerpro s.c. Ewa i Marcin Bieleccy

ul. Hanki Czaki 4/27 01-588 Warszawa

Tel./fax: (22) 354 63 32

www.pro.kerpro.pl